

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dluto-kostne-stille-dlugosc-200cm-wybor-rozmiarow-10mm-15mm-20mm-25mm-p-27.html>



Dłuto kostne STILLE, długość 20.0cm - (wybór rozmiarów: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm)

Cena brutto	42,12 zł
Cena netto	39,00 zł

Opis produktu

☐☐☐☐ DŁUTO KOSTNE STILLE 20CM

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dłuto kostne STILLE 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Dłuto kostne - [narzędzie chirurgiczne](#) z jednostronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Dłuto kostne Stille to wysokiej klasy narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **precyzyjnego opracowywania i modelowania tkanki kostnej**. Wykonane z trwałej, odpornej na korozję stali nierdzewnej, zapewnia pełną stabilność oraz komfort pracy w warunkach zabiegowych.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Długość całkowita:** 20 cm
- ☐☐ **Szerokość ostrza:** 10mm, 15mm, 20mm, 25mm
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna – narzędzie wielorazowego użytku
- ☐☐ **Typ:** dłuto kostne (Stille)
- ☐☐ **Przeznaczenie:** chirurgia, ortopedia, zabiegi kostne

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ Precyzyjnie wyprofilowane ostrze dla dokładnej pracy
- ☐☐ Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne
- ☐☐ Przystosowane do wielokrotnej sterylizacji
- ☐☐ Odporność na korozję i uszkodzenia
- ☐☐ Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pewny chwyt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość dłuta: 10mm , 15mm , 20mm , 25mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl