

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dzwignia-korzeniowa-bein-prosto-scieta-koncowka-wybor-rozmiarow-2mm-3mm-4mm-5mm-p-44.html>



Dźwignia korzeniowa BEIN, prosto ścięta końcówka - (wybór rozmiarów: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm)

Cena brutto	15,12 zł
Cena netto	14,00 zł

Opis produktu

Dźwignia korzeniowa BEIN, prosto ścięta końcówka

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dźwignię korzeniową BEIN, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Dźwignia korzeniowa BEIN Fig. 4 z prostą końcówką o szerokości 5 mm to specjalistyczne narzędzie stosowane w chirurgii stomatologicznej do usuwania korzeni zębów oraz ich fragmentów. Konstrukcja narzędzia umożliwia precyzyjne operowanie w polu zabiegowym, co jest istotne przy zabiegach wymagających dokładności.

Produkt wykonany został z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, zapewniającej trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt wspiera stabilność oraz komfort pracy podczas zabiegów.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne usuwanie korzeni i fragmentów zębów
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Końcówka prosta o szerokości 5 mm do kontroli pracy
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Przeznaczona do profesjonalnych procedur stomatologicznych

Specyfikacja techniczna

- Szerokość końcówki: 5 mm
- Typ końcówki: prosta
- Materiał: stal chirurgiczna
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Typ narzędzia: dźwignia korzeniowa BEIN Fig. 4
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Dźwignia przeznaczona jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- w chirurgii stomatologicznej
- do usuwania korzeni zębów i ich fragmentów
- podczas zabiegów ekstrakcji
- w gabinetach stomatologicznych i klinikach

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia końcówki roboczej
- △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazu tkanek – stosować zgodnie z przeznaczeniem
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Posiadamy w sprzedaży dostępne szerokości końcówek:

- Fig.0, 2mm
- Fig.1, 3mm,
- Fig.2, 4mm
- Fig.4, 5mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość końcówki: 2mm , 3mm , 4mm , 5mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl