

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-do-ran-langenbeck-220cm-wybor-rozmiarow-30x11mm-30x14mm-30x16mm-40x11mm-50x11mm-p-88.html>



Hak do ran LANGENBECK 22.0cm - (wybór rozmiarów: 30x11mm, 30x14mm, 30x16mm, 40x11mm, 50x11mm)

Cena brutto **26,46 zł**

Cena netto **24,50 zł**

Opis produktu

Hak do ran LANGENBECK 22.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak do ran LANGENBECK 22.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Hak LANGENBECK 22.0cm jest dostępny w następujących rozmiarach:

- **30x11mm**
- **30x14mm**
- **30x16mm**
- **40x11mm**
- **50x11mm**

Opis produktu

Hak chirurgiczny **Langenbeck** to niezawodne narzędzie stosowane podczas zabiegów chirurgicznych do **delikatnego odciągania oraz ekspozycji tkanek**. Dzięki odpowiedniemu profilowi zapewnia świetną widoczność pola operacyjnego oraz komfort pracy operatora.

Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 22,0 cm
- **Model:** Langenbeck
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Przeznaczenie:** zabiegi chirurgiczne, operacyjne, ogólne oraz specjalistyczne

Najważniejsze cechy

- Optymalne wyprofilowanie zapewniające skuteczne odciąganie tkanek
- Ergonomiczny uchwyt gwarantujący pewną pracę
- Wysoka odporność na uszkodzenia i korozję
- Możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary haka: 30x11mm , 30x14mm , 30x16mm , 40x11mm , 50x11mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl