
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-green-230cm-p-1164.html>



Hak GREEN 23.0cm

Cena brutto	52,92 zł
-------------	-----------------

Cena netto	49,00 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Hak DOYEN, długość 25.0cm, szerokość 50mm x 85mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak DOYEN, długość 25.0cm, 50mm x 85mm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Wyrób medyczny do zastosowań zabiegowych

Hak chirurgiczny **DOYEN** to narzędzie medyczne przeznaczone do odciągania tkanek podczas procedur zabiegowych i operacyjnych. Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali nierdzewnej, zapewnia precyzję oraz pewny, stabilny uchwyt pracy.

Najważniejsze cechy produktu

Długość całkowita: 25.0 cm

Wymiary części roboczej: 50mm x 85 mm

Materiał: stal nierdzewna wysokiej jakości

Możliwość sterylizacji w autoklawie

Trwała konstrukcja odporna na odkształcenia

Ergonomiczny kształt dla komfortowej pracy

Przystosowany do intensywnego użytkowania w placówkach medycznych

Zastosowanie

Hak DOYEN znajduje zastosowanie w:

- ✓ chirurgii ogólnej
- ✓ zabiegach operacyjnych
- ✓ procedurach wymagających odciągania i ekspozycji tkanek
- ✓ gabinetach zabiegowych i salach operacyjnych

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl