

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-kocher-250cm-80mm-x-55mm-retraktor-chirurgiczny-p-86.html>



Hak KOCHER 25.0cm, 80mm x 55mm, retraktor chirurgiczny

Cena brutto **40,93 zł**

Cena netto **37,90 zł**

Opis produktu

Hak KOCHER 25.0cm, 80mm x 55mm, retraktor chirurgiczny

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak KOCHER 25.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Wyrób medyczny do odciągania i ekspozycji tkanek

Opis produktu

Hak chirurgiczny **Kocher** to solidne i precyzyjnie wykonane narzędzie wykorzystywane podczas zabiegów operacyjnych do **odciągania tkanek i poprawy widoczności pola operacyjnego**. Szeroka końcówka robocza zapewnia skuteczną ekspozycję przy zachowaniu bezpieczeństwa tkankowego.

Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 25,0 cm
- **Rozmiar końcówki:** 80mm x 55mm
- **Typ:** hak chirurgiczny Kocher
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** chirurgia ogólna, zabiegi operacyjne, ortopedia

Najważniejsze cechy

- Stabilne i skuteczne odciąganie tkanek
- Ergonomiczny uchwyt dla pewnej i precyzyjnej pracy
- Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia
- Przystosowany do sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku

Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do użytkowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl