

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-kocher-langenbeck-215cm-rozmiar-lyzki-70mm-x-14mm-p-87.html>



Hak KOCHER-LANGENBECK 21.5cm, rozmiar łyżki 70mm x 14mm

Cena brutto **32,29 zł**

Cena netto **29,90 zł**

Opis produktu

Hak KOCHER-LANGENBECK 21.5cm, rozmiar łyżki 70mm x 14mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Hak KOCHER-LANGENBECK 21.5cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Hak chirurgiczny typu Kocher-Langenbeck o długości 21,5 cm z łyżką o wymiarach 70mm x 14 mm to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do odciągania i utrzymywania tkanek podczas zabiegów operacyjnych. Szeroka powierzchnia robocza umożliwia równomierne rozłożenie nacisku, co sprzyja bezpiecznej i efektywnej retrakcji.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny kształt narzędzia wspiera komfort pracy i precyzyjną kontrolę podczas zabiegów.

Najważniejsze zalety

- Szeroka łyżka 70mm x 14mm zapewniająca skuteczną retrakcję tkanek
- Długość 21,5 cm umożliwiającą pracę w głębokim polu operacyjnym
- Stabilna konstrukcja ułatwiająca utrzymanie pola zabiegowego
- Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- Możliwość wielokrotnej sterylizacji

Specyfikacja techniczna

- Długość: 21,5 cm
- Wymiary łyżki: 70mm x 14mm
- Typ: hak chirurgiczny Kocher-Langenbeck
- Materiał: stal nierdzewna
- Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

Zastosowanie

- Retrakcja i odciąganie tkanek podczas zabiegów chirurgicznych
- Zabiegi ortopedyczne i chirurgii ogólnej
- Utrzymanie dostępu do pola operacyjnego
- Zastosowanie w placówkach medycznych i weterynaryjnych

Bezpieczeństwo i certyfikaty

- Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE

-
- □□ Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami
 - □□ Wymaga czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- △ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
- △ Stosować ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego ucisku tkanek
- △ Przed użyciem sprawdzić stan techniczny narzędzia
- △ Nie używać w przypadku uszkodzenia
- △ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl