

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-senn-muller-160cm-wybor-figur-ostrozebny-tepozebny-p-92.html>



Hak SENN-MULLER 16.0cm - (wybór figur: ostrozębny, tępozębny)

Cena brutto **23,65 zł**

Cena netto **21,90 zł**

Opis produktu

Hak SENN-MULLER 16.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak SENN-MULLER 16.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Hak chirurgiczny **SENN-MÜLLER**, o długości **16 cm**, to precyzyjne narzędzie stosowane w chirurgii ogólnej, ortopedii, weterynarii oraz zabiegach rekonstrukcyjnych. Model **tępozębny** zapewnia skuteczne odciąganie tkanek miękkich, jednocześnie umożliwiając pełną kontrolę i precyzję pracy.

Narzędzie wykonane zostało ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, gwarantującej odporność na korozję i możliwość wielokrotnej sterylizacji.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 16 cm

Rodzaj haka: Tępozębny lub ostrozębny

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Sterylizacja: Autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Odciąganie tkanek

Najważniejsze cechy

Zaleta

Opis

Stal chirurgiczna premium: Wysoka trwałość i odporność na korozję

Końcówka: Precyzyjne zaczeplanie tkanek

Długość 16 cm: Uniwersalny rozmiar do zabiegów

Sterylizowalny: Autoklaw lub dezynfekcja chemiczna

☐ **Ergonomiczna konstrukcja:** Pewny i wygodny chwyt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj haka: ostrozębny , tepozębny

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl