

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-barraquer-140cm-zagiety-p-1157.html>

Igłotrzymacz BARRAQUER 14.0cm, zagięty



Cena brutto **109,00 zł**

Cena netto **100,93 zł**

Opis produktu

Igłotrzymacz BARRAQUER 14.0cm, zagięty

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Igłotrzymacz BARRAQUER 14.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Profesjonalny wyrób medyczny do precyzyjnych zabiegów

☐☐ Narzędzie dla specjalistów

Igłotrzymacz Igłotrzymacz BARRAQUER 14.0cm to instrument chirurgiczny stosowany w zabiegach wymagających wyjątkowej precyzji. Doskonale sprawdza się w okulistyce, stomatologii, mikrochirurgii oraz w pracach laboratoryjnych i weterynaryjnych.

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ **Długość: 140 mm**
- ☐☐ **Konstrukcja, zagięta**
- ☐☐ **Łatwy do dezynfekcji i sterylizacji**
- ☐☐ **Precyzyjny mechanizm blokujący**

☐☐ Zastosowanie

- ☐☐ Okulistyka
- ☐☐ Stomatologia
- ☐☐ Mikrochirurgia i zabiegi precyzyjne
- ☐☐ Chirurgia weterynaryjna
- ☐☐ Prace laboratoryjne i manualne wymagające dużej dokładności

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

-
1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
 2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
 3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
 4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
 5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
 6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl