

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-brown-dlugosc-130cm-imadlo-chirurgiczne-p-102.html>



Igłotrzymacz BROWN, długość 13.0cm, imadło chirurgiczne

Cena brutto **13,93 zł**

Cena netto **12,90 zł**

Opis produktu

Igłotrzymacz BROWN 13.0cm

Igłotrzymacz BROWN to bardzo wszechstronny instrument. Służy do przytrzymywania igieł podczas zabiegów chirurgicznych lub szycia. Posiada ząbkowane szczęki, które umożliwiają wygodne i mocne trzymanie. Ten igłotrzymacz może być częścią wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.

Igłotrzymacz BROWN cechy charakterystyczne:

- rozmiar: 13cm
- zacisk z 3 stopniową funkcją blokowania
- ergonomiczna budowa
- wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [BROWN](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERF](#), [COLLIER](#), [OLSEN-HEGAR](#), GILES, [CRILE-WOOD](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [BROWN](#).

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl