

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-castroviejo-prosty-140mm-p-103.html>

## Igłotrzymacz Castroviejo prosty 140mm



Cena brutto **145,80 zł**

Cena netto **135,00 zł**

### Opis produktu

## Igłotrzymacz Castroviejo

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Igłotrzymacz Castroviejo, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Profesjonalny wyrób medyczny do precyzyjnych zabiegów

☐☐ Narzędzie dla specjalistów

Igłotrzymacz **Castroviejo 140 mm (prosty)** to instrument chirurgiczny stosowany w zabiegach wymagających wyjątkowej precyzji. Doskonale sprawdza się w okulistyce, stomatologii, mikrochirurgii oraz w pracach laboratoryjnych i weterynaryjnych.

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ **Długość: 140 mm**
- ☐☐ **Konstrukcja prosta**
- ☐☐ **Antypoślizgowe, radełkowane szczęki** — pewny chwyt igły
- ☐☐ **Łatwy do dezynfekcji i sterylizacji**
- ☐☐ **Precyzyjny mechanizm blokujący**

☐☐ Zastosowanie

- ☐☐ Okulistyka
- ☐☐ Stomatologia
- ☐☐ Mikrochirurgia i zabiegi precyzyjne
- ☐☐ Chirurgia weterynaryjna
- ☐☐ Prace laboratoryjne i manualne wymagające dużej dokładności

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego

---

wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)