

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-gillies-160cm-z-odgieta-raczka-oraz-funkcja-nozyczek-imadlo-chirurgiczne-p-110.html>



## Igłotrzymacz GILLIES 16.0cm z odgiętą rączką oraz funkcją nożyczek, imadło chirurgiczne

Cena brutto	<b>20,41 zł</b>
Cena netto	<b>18,90 zł</b>

### Opis produktu

## ∞ Igłotrzymacz GILLIES 16.0cm z odgiętą rączką oraz funkcją nożyczek

Igłotrzymacz GILLIES to połączenie dwóch instrumentów. Stosowany do przytrzymywania igieł i nacinania delikatnych tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Funkcja „dwa w jednym” sprawia, że jest wszechstronny i nadaje się do szerokiej gamy operacji.

### Wyrób medyczny do szycia chirurgicznego

#### □□ Opis produktu

Igłotrzymacz **Gillies z nożyczkami** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne, które **łączy funkcję chwytania igły oraz cięcia nici**. Dzięki kompaktowej konstrukcji i ergonomicznemu układowi dźwigni umożliwia wygodną, szybką i bezpieczną pracę podczas procedur szycia chirurgicznego.

#### □□ Parametry techniczne

- □□ **Długość całkowita:** 16,0 cm
- □□ **Typ:** igłotrzymacz z wbudowanymi nożyczkami
- □□ **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- □□ **Zastosowanie:** chirurgia ogólna, zabiegowa, plastyczna, rekonstrukcyjna

#### □ Najważniejsze cechy

- □□ Precyzyjny chwyt igły zapewniający stabilne szycie
- ∞ Wbudowane nożyczki umożliwiają szybkie cięcie nici
- □□ Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnej kontroli i komfortu
- □□ Wysoka odporność na korozję i intensywne użytkowanie
- □□ Możliwość sterylizacji w autoklawie
- □□ Narzędzie wielorazowego użytku

#### □□ Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **wykwalfikowany personel medyczny**

---

Igłotrzymacz GILLIES cechy charakterystyczne:

- rozmiar: 16cm
- wzór zakrzywiony
- wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [GILLES](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERE](#), [GILLES](#), [OLSEN-HEGAR](#), [GILES](#), [GILLES](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [GILLES](#).

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

☐ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)