

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kateter-uszny-hartmann-wybor-rozmiarow-p-128.html>



## Kateter uszny HARTMANN - wybór rozmiarów

Cena brutto **15,01 zł**

Cena netto **13,90 zł**

### Opis produktu

## Kateter uszny HARTMANN

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu oferujemy **kateter uszny HARTMANN**, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Długość katetera usznego HARTMAN wynosi ok.14cm.

W sprzedaży posiadamy **kateter uszne HARTMANN** o 3 rozmiarach:

- zewnętrzna średnica rurki: Ø1mm, zakończenie bez "kulki"
- zewnętrzna średnica rurki: Ø1,5mm, średnica "kulki": Ø2,5mm
- zewnętrzna średnica rurki: Ø2,5mm, średnica "kulki": Ø3,5mm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiary:** zewnętrzna średnica rurki: Ø1mm, zakończenie bez "kulki", zewnętrzna średnica rurki: Ø1,5mm, średnica "kulki": Ø2,5mm, zewnętrzna średnica rurki: Ø2,5mm, średnica "kulki": Ø3,5mm

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.

- 
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
  7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
  8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
  9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
  10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)