

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-ciecia-drutu-230cm-tc-z-wkladka-utwardzana-weglikiem-wolframu-oraz-z-przekladnia-dzwigniowa-p-136.html>



Kleszcze do cięcia drutu 23.0cm, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu oraz z przekładnią dźwigniową

Cena brutto	322,92 zł
Cena netto	299,00 zł

Opis produktu

Kleszcze do cięcia drutu i kości 23.0cm, z twardą wkładką (węglikiem wolframu) oraz z przekładnią dźwigniową

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do cięcia drutu 23.0cm, z twardą wkładką.

Do cięcia:

miękkiego drutu - max $\varnothing$ 3mm,

twardego drutu - max $\varnothing$ 2mm.

Kleszcze do cięcia drutu posiada przekładnię dźwigniową dzięki czemu zostaje zwiększona siła cięcia. Przekładnia dźwigniowa znacznie redukuje wysiłek występujący podczas cięcia - korzystanie z tych kleszczy wymaga znacznie mniejszego nakładu sił.

Wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej, utwardzone ostrza, posiadają znak CE.

Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.

10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl