
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-drutu-140cm-p-138.html>



Kleszcze do drutu 14.0cm

Cena brutto	39,85 zł
Cena netto	36,90 zł

Opis produktu

Kleszcze do gięcia drutu 14cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do gięcia drutu 14.0cm. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji. Wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Narzędzie ortodontyczno-chirurgiczne

Opis produktu

Kleszcze **do gięcia drutu 14,0 cm** to precyzyjne narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do formowania i modelowania drutów ortodontycznych oraz innych elementów metalowych stosowanych w procedurach medycznych. Zaprojektowane dla maksymalnej kontroli, precyzji i komfortu pracy.

Najważniejsze cechy

- **Długość: 14,0 cm** – kompaktowe i poręczne
- **Wysokiej jakości stal nierdzewna** – odporna na korozję i uszkodzenia
- **Precyzyjne szczęki** – idealne do formowania drutu
- **Ergonomiczny uchwyt** – pewny chwyt i komfort pracy
- **Możliwość wielokrotnej sterylizacji (autoklaw)**
- Idealne do zastosowań ortodontycznych i chirurgicznych

Zastosowanie

- Ortodoncja
- Chirurgia stomatologiczna
- Modelowanie drutów i elementów metalowych
- Prace laboratoryjne i gabinetowe

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl