
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-drutu-dlugosc-160cm-p-140.html>



Kleszcze do drutu, długość 16.0cm

Cena brutto	42,01 zł
-------------	-----------------

Cena netto	38,90 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Kleszcze do drutu 16.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do drutu 16.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszcze do drutu 16.0 cm to precyzyjny instrument medyczny przeznaczony do cięcia oraz formowania drutów chirurgicznych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniają długotrwałą wytrzymałość, niezawodność i wygodę pracy.

Najważniejsze cechy

- **Długość:** 16 cm
- **Ostre i wytrzymałe ostrza** — skuteczne cięcie drutów chirurgicznych
- **Stal nierdzewna klasy medycznej** — odporność na korozję i środki dezynfekujące
- **Możliwość sterylizacji**
- Idealne do zastosowań w: chirurgii, ortopedii, stomatologii, gabinetach zabiegowych

Zastosowanie

Kleszcze sprawdzą się podczas:

- cięcia drutów chirurgicznych
- modelowania i zakładania drutów
- zabiegów ortopedycznych
- procedur w gabinetach medycznych i ambulatoryjnych

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia

może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl