

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-drutu-i-kości-220cm-tc-z-wkładka-utwardzana-węglikiem-wolframu-oraz-z-przekładnia-dźwigniowa-p-142.html>



## Kleszcze do drutu i kości 22.0cm, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu oraz z przekładnią dźwigniową

Cena brutto	<b>247,32 zł</b>
Cena netto	<b>229,00 zł</b>

### Opis produktu

## Kleszcze do cięcia drutu i kości 22.0cm, z twardą wkładką (węglikiem wolframu) oraz z przekładnią dźwigniową

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do cięcia drutu 22.0cm, z twardą wkładką.

Do cięcia:

miękkiego drutu - max  $\varnothing$ 3mm,

twardego drutu - max  $\varnothing$ 2mm.

Kleszcze do cięcia drutu posiada przekładnię dźwigniową dzięki czemu zostaje zwiększona siła cięcia. Przekładnia dźwigniowa znacznie redukuje wysiłek występujący podczas cięcia - korzystanie z tych kleszczy wymaga znacznie mniejszego nakładu sił.

Wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej, utwardzone ostrza, posiadają znak CE.

Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.

---

10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)