

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-giecia-drutu-dlugosc-150cm-waska-koncowka-p-139.html>



Kleszcze do gięcia drutu, długość 15.0cm, wąska końcówka

Cena brutto **43,09 zł**

Cena netto **39,90 zł**

Opis produktu

Kleszcze do gięcia drutu 15.0cm, wąska końcówka

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do drutu 15.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji. Wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszcze do gięcia drutu o długości 15 cm z wąską końcówką to specjalistyczne narzędzie wykorzystywane w stomatologii, ortodoncji oraz chirurgii do precyzyjnego formowania drutu i elementów metalowych.

Dzięki smukłej końcówce roboczej umożliwiają dokładną pracę nawet w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja zapewnia pewny chwyt oraz kontrolę podczas modelowania materiału.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co gwarantuje trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt zwiększa komfort użytkowania.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne gięcie drutu i elementów ortodontycznych
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Wąska końcówka do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Długość 15 cm zapewniająca komfort i kontrolę
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji

Specyfikacja techniczna

- Długość całkowita: 15,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: kleszcze do gięcia drutu, wąska końcówka
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Kleszcze przeznaczone są do zastosowań medycznych, w szczególności:

- w ortodoncji do formowania łuków i drutów
- w stomatologii i technice dentystycznej
- w gabinetach stomatologicznych i pracowniach protetycznych
- do precyzyjnej pracy wymagającej kontroli i dokładności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- ⚠ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- ⚠ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- ⚠ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
- ⚠ Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia materiału lub urazów
- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl