

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-trzymania-kosci-ulrich-wybor-rozmiarow-18cm-23cm-25cm-28cm-p-147.html>



## Kleszcze do trzymania kości ULRICH - (wybór rozmiarów: 18cm, 23cm, 25cm, 28cm)

Cena brutto	<b>171,72 zł</b>
Cena netto	<b>159,00 zł</b>

### Opis produktu

## Kleszcze do trzymania kości ULRICH

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do trzymania kości ULRICH; które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Kleszczyki do trzymania kości Ulricha idealnie nadają się do chwytania i manipulowania kością lub jej segmentami. Unikalna konstrukcja tego instrumentu obejmuje blokadę prędkości, a także lekko zębrowane szczęki, które zwiększają zdolność mocnego trzymania kości. Dodatkowo rękojeść tych kleszczyków jest lekko żebrowana, co zwiększa chwyt, aby umożliwić skuteczne trzymanie podczas całej procedury.

Kościotrzymacz ULRICH dostępny jest w 3 różnych długościach o różnej szerokości szczęk. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 18.0cm , 23.0cm , 25.0cm , 28.0cm

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

---

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl