
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-ekstrakcyjne-do-zebow-mlecznych-klein-nr-139-do-trzonowcow-gornych-p-178.html>



Kleszcze ekstrakcyjne do zębów mlecznych KLEIN, nr 139, do trzonowców górnych

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	28,70 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszcze ekstrakcyjne do zębów mlecznych KLEIN Fig. 139

Kleszcze stomatologiczne do przedtrzonowców górnych

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze ekstrakcyjne do zębów mlecznych KLEIN Fig. 139, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Narzędzie do ekstrakcji zębów mlecznych w stomatologii dziecięcej**

☐☐ Kleszcze ekstrakcyjne **KLEIN Fig. 139** to specjalistyczne narzędzie stomatologiczne stworzone z myślą o bezpiecznym i precyzyjnym usuwaniu **zębów mlecznych**. Ich ergonomiczna konstrukcja zapewnia stabilny chwyt oraz pełną kontrolę podczas zabiegu, co jest szczególnie ważne w pracy z małymi pacjentami.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ **Model:** KLEIN, Fig. 139

☐☐ **Przeznaczenie:** ekstrakcja zębów mlecznych

☐☐ **Materiał:** medyczna stal nierdzewna

☐☐ **Sterylizacja w autoklawie - TAK**

☐☐ Precyzyjne wyprofilowanie ramion

☐☐ Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia

☐☐ Idealne do pracy w gabinetach stomatologii dziecięcej

☐☐ Zastosowanie

Kleszcze sprawdzą się w:

- ✓ stomatologii dziecięcej (pedodoncji)
- ✓ zabiegach ekstrakcyjnych zębów mlecznych
- ✓ gabinetach stomatologicznych i klinikach
- ✓ procedurach wymagających delikatnego, precyzyjnego chwytu

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

