

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-stomatologiczne-ekstrakcyjne-bertena-fig-86a-do-zebow-dolnych-trzonowych-p-175.html>



Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 86A, do zębów dolnych trzonowych

Cena brutto	29,90 zł
Cena netto	27,69 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 86A, do zębów dolnych trzonowych

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 86A, do zębów dolnych trzonowych, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Kleszcze stomatologiczne ekstrakcyjne typu BERTENA fig. 86A to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do usuwania dolnych zębów trzonowych. Ich konstrukcja umożliwia pewny chwyt oraz efektywne przenoszenie siły podczas ekstrakcji, co jest istotne przy pracy z zębami o rozbudowanej strukturze korzeniowej.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, zapewniającej trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt oraz odpowiednio wyprofilowane końcówki robocze wspierają precyzję oraz bezpieczeństwo pracy.

☐☐ Najważniejsze zalety

- ☐ Skuteczna i precyzyjna ekstrakcja dolnych zębów trzonowych
- ☐☐ Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- ☐☐ Konstrukcja dopasowana do anatomii zębów trzonowych
- ☐☐ Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- ☐☐ Przeznaczone do profesjonalnych zabiegów stomatologicznych

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Przeznaczenie: dolne zęby trzonowe
- ☐☐ Materiał: stal chirurgiczna
- ☐☐ Typ: kleszcze ekstrakcyjne BERTENA fig. 86A
- ☐☐ Wielorazowego użytku: tak
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- ☐☐ Klasa wyrobu: wyrób medyczny

☐☐ Zastosowanie

Kleszcze przeznaczone są do zastosowań medycznych, w szczególności:

- ☐☐ do ekstrakcji dolnych zębów trzonowych
- ☐☐ w chirurgii stomatologicznej

-
- □□ podczas zabiegów usuwania zębów wielokorzeniowych
 - □□ w gabinetach stomatologicznych i klinikach

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

□□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- □ Oznakowanie CE
- △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
- △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek lub powikłań zabiegowych
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl