

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-collin-140cm-hemostatyczne-koncowki-chwytno-okienkowe-trojkatne-p-199.html>



Kleszczyki COLLIN 14.0cm, hemostatyczne, końcówki chwytne okienkowe trójkątne

Cena brutto	21,49 zł
Cena netto	19,90 zł

Opis produktu

Kleszczyki COLLIN 14.0cm, hemostatyczne, końcówki chwytne okienkowe trójkątne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki COLLIN 14.0cm, hemostatyczne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Opis produktu

Kleszczyki **COLLIN** w wersji **14 cm** to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne wyposażone w charakterystyczne **trójkątne końcówki**, które umożliwiają precyzyjne chwytanie i kontrolę tkanek. Dzięki solidnej konstrukcji oraz wyważeniu są wygodne w użytkowaniu i zapewniają pełną stabilność podczas zabiegu.

Kleszcze Collin stosuje się podczas zabiegów do chwytania organów i tkanek m.in. tkanek (płucnej, żołądka, jelit, itd.), do zabezpieczenia języka u pacjentów, którzy są pod wpływem narkozy lub są nieprzytomni, do piercingu. (jako tzw. językotrzymacz). Instrument posiada rowkowaną powierzchnię chwytającą dzięki czemu nie będą się przesuwać na tkankach oraz dobrze uchwycą każdy przedmiot.

Wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej medycznej**, odznaczają się dużą odpornością na korozję oraz długą żywotnością — nawet przy częstym procesie sterylizacji.

Parametry

- długość 14 cm
- typ - Collin
- okienkowe trójkątne
- zamknięcie pierścieniowe zapadkowe
- ząbkowany styl powierzchni roboczej
- niesterylne
- wielokrotnego użytku

Zalety kleszczyków do języka Collin

- wysoka jakość wykonania z stali nierdzewnej
- ryflowane końcówki powodują komfortowe chwytanie
- narzędzie wyważone a uchwyty dopasowane do ręki
- możliwość sterylizacji w autoklawie zgodnie z warunkami sterylizacji

☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐ **Długość:** 14,0 cm
- ☐ **Końcówki:** Trójkątne, precyzyjnie profilowane
- ☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalne
- ☐ **Ergonomia:** Stabilny uchwyt, kontrolowane prowadzenie
- ☐ **Przeznaczenie:** Chirurgia / Zabiegi ogólne / Weterynaria

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha Wartość

- ☐ **Długość:** 14,0 cm
- ☐ **Końcówki:** Trójkątne
- ☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐ **Sterylizacja:** Autoklaw
- ♾ **Waga:** Idealnie wyważone, wygodne
- ☐ **Zastosowanie:** Chirurgia, zabiegi ogólne, weterynaria

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Precyzyjne chwytanie tkanek
- ✓ Zabiegi chirurgiczne
- ✓ Pracownie zabiegowe
- ✓ Procedury weterynaryjne

Kleszczyki Collin okienkowe należą do grupy kleszczy wykorzystywanych w chirurgii ogólnej (przeważnie chirurgii jamy ustnej i gardła).

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić,

nasmarować i poddać sterylizacji.

2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl