

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-do-migdalekow-blohmke-200cm-p-270.html>



Kleszczyki do migdałków BLOHMKE 20.0cm

Cena brutto **32,29 zł**

Cena netto **29,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki do migdałków BLOHMKE 20.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki COLVER 19cm, do chwytania migdałków, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszczyki do migdałków typu BLOHMKE o długości 20 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do procedur w obrębie jamy ustnej i gardła. Produkt został wykonany z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość, odporność na procesy sterylizacji oraz długotrwałe użytkowanie.

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia precyzyjne operowanie narzędziem, a odpowiednio zaprojektowane końcówki pozwalają na pewny i stabilny chwyt tkanek. Narzędzie spełnia wymagania stawiane instrumentom stosowanym w placówkach medycznych.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne wykonanie zapewniające dokładny chwyt tkanek
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Produkt wielokrotnego użytku – możliwość sterylizacji
- Optymalna długość 20 cm dla komfortu pracy
- Przeznaczone do profesjonalnego użytku medycznego

Opis produktu

Kleszczyki do migdałków typu BLOHMKE o długości 20 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do procedur w obrębie jamy ustnej i gardła. Produkt został wykonany z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość, odporność na procesy sterylizacji oraz długotrwałe użytkowanie.

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia precyzyjne operowanie narzędziem, a odpowiednio zaprojektowane końcówki pozwalają na pewny i stabilny chwyt tkanek. Narzędzie spełnia wymagania stawiane instrumentom stosowanym w placówkach medycznych.

Specyfikacja techniczna

- Długość: 20,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Typ narzędzia: kleszczyki do migdałków (BLOHMKE)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

☐☐ Zastosowanie

Kleszczyki przeznaczone są do użytku w placówkach medycznych, w szczególności:

- ☐☐ w zabiegach laryngologicznych
- ☐☐[‡] podczas procedur usuwania migdałków
- ☐☐ w chirurgii jamy ustnej i gardła
- ☐☐ w szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- △ Wyrób medyczny – używać zgodnie z instrukcją użytkownika
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednią sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

