

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-heiss-200cm-wybor-figur-prosta-lekkozagieta-zagieta-p-216.html>



Kleszczyki HEISS 20.0cm - (wybór figur: prosta, lekkozagięta, zagięta)

Cena brutto **22,57 zł**

Cena netto **20,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki HEISS

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki HEISS, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Dostępne długości kleszczyków HEISS w sprzedaży na innych aukcjach w następujących wersjach:

- prostej,
- lekkozagiętej,
- zagiętej.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Na skróty, poniżej linki do najczęściej kupowanych [narzędzi chirurgicznych](#):

- [Kleszczyki PEAN naczyniowe](#)
- [Kleszczyki Kocher chirurgiczne 1x2 zęb](#)
- [Nożyczki chirurgiczne ostro/ostre](#)
- [Nożyczki chirurgiczne ostro/tępe](#)
- [Nożyczki chirurgiczne tępo/tępe](#)
- [Pincety anatomiczne](#)
- [Pincety chirurgiczne z zębkiem. 1x2 zęb](#)
- [Igłotrzymacz MATHIEU](#)
- [Igłotrzymacz MAYO-HEGAR](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: lekko odgięte , odgięte , proste

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl