
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-hemoroidalne-luer-245cm-p-217.html>



Kleszczyki hemoroidalne LUER 24.5cm

Cena brutto **37,69 zł**

Cena netto **34,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Kleszczyki hemoroidalne LUER 24.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki hemoroidalne LUER 24.5cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Kleszczyki hemoroidalne LUER 24.5 cm to specjalistyczny instrument chirurgiczny przeznaczony do zabiegów proktologicznych, w szczególności do chwytania, podtrzymywania i manipulowania tkankami w obrębie hemoroidów. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewniają precyzję oraz komfort pracy.

☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐☐ **Długość:** 24.5 cm
- ☐☐ **Profilowana końcówka chwytana** - bezpieczna dla delikatnych tkanek
- ☐☐ **Stal nierdzewna klasy medycznej** - wysoka odporność na korozję
- ☐☐ **Możliwość sterylizacji** we wszystkich standardowych metodach
- ☐☐ **Przeznaczone do zabiegów proktologicznych i chirurgicznych**

☐☐ Zastosowanie

Kleszczyki LUER są używane podczas:

- ☐☐ procedur proktologicznych
- ☐☐ chwytania i przytrzymywania tkanek hemoroidalnych
- ☐☐ zabiegów w warunkach klinicznych i ambulatoryjnych

☐☐ Atesty i zgodność

- ☐☐ ✓ Certyfikowany **wyrób medyczny**
- ☐☐ ✓ Zgodność z normami dla instrumentów chirurgicznych
- ☐☐ ✓ Odpowiednie do profesjonalnego użytku klinicznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl