

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-jelitowe-babcock-wybor-rozmiarow-135cm-16cm-p-188.html>

Kleszczyki jelitowe BABCOCK - (wybór rozmiarów: 13.5cm, 16cm)

Cena brutto **21,49 zł**

Cena netto **19,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki jelitowe BABCOCK

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki jelitowe BABCOCK, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszczyki jelitowe typu BABCOCK to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do atraumatycznego chwytania delikatnych tkanek, takich jak jelita czy inne struktury miękkie. Ich charakterystyczna konstrukcja pozwala na stabilne uchwycenie bez nadmiernego ucisku, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, zapewniającej trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt oraz precyzyjny mechanizm zamykający umożliwiają kontrolowaną i bezpieczną pracę.

Produkt dostępny w dwóch wariantach długości, co pozwala na dopasowanie narzędzia do specyfiki zabiegu.

Najważniejsze zalety

- Atraumatyczny chwyt delikatnych tkanek
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Dostępne dwa rozmiary: 13,5 cm i 16 cm
- Narzędzie wielokrotnego użytku – możliwość sterylizacji
- Przeznaczone do profesjonalnych zastosowań chirurgicznych

Specyfikacja techniczna

- Dostępne długości: 13,5 cm / 16 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: kleszczyki jelitowe BABCOCK (atraumatyczne)
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Kleszczyki przeznaczone są do zastosowań medycznych, w szczególności:

- do chwytania delikatnych tkanek (np. jelit)
- w chirurgii ogólnej i zabiegowej
- podczas procedur wymagających atraumatycznego uchwytu
- w szpitalach, klinikach i gabinetach zabiegowych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE
- ⚠ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- ⚠ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- ⚠ Nie stosować w przypadku uszkodzenia mechanizmu lub końcówek
- ⚠ Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia tkanek
- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 13.5cm, 6mm , 16cm, 8mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl