

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-magilla-do-intubacji-wybor-rozmiarow-17cm-20cm-25cm-p-226.html>



Kleszczyki MAGILLA do intubacji - (wybór rozmiarów: 17cm, 20cm, 25cm)

Cena brutto **44,28 zł**

Cena netto **41,00 zł**

Opis produktu

Kleszczyki MAGILLA do intubacji

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu MAGILLA do intubacji, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Kleszczyki Magilla mają zastosowanie podczas wprowadzenia rurki dotchawiczej do tchawicy podczas intubacji dotchawiczej, ustalania pozycji rurki przy intubacji nosowej, wprowadzania sondy żołądkowej, do usuwania ciał obcych z górnych dróg oddechowych u znieczulonych lub nieprzytomnych pacjentów. Kleszcze Magilla intubacyjne są pochylone w dwóch płaszczyznach, co pozwala na użycie w jamie ustnej i gardle pod bezpośrednim widzeniem podczas laryngoskopii. Kleszczyki osiadają uniwersalne zastosowanie w anestezjologii, chirurgii, medycynie ratunkowej, a także mogą być wykorzystywane w weterynarii.

Specyfikacja kleszczyków Magilla intubacyjnych

- dostępne długości: 17cm, 20cm, 25cm
- wygięte
- matowe wykończenie
- okrągła końcówka robocza
- dla dorosłych i dzieci
- stal nierdzewna chirurgiczna
- wielokrotnego użytku

Cechy z stosowania szczypczyków Magilla do intubacji

- część pracująca ma kształt oczodołu dla lepszego manewrowania rurkami podczas zabiegów
- odpowiedni kształt oraz wyprofilowanie ułatwią pracę profesjonalistą podczas zabiegów
- posiadają uniwersalne zastosowanie w anestezjologii, chirurgii, medycynie ratunkowej
- podlegają dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie nasyconą parą wodną w 134°C

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 17cm , 20cm , 25cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl