

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-mixter-zagiete-preparacyjne-wybor-dlugosci-18cm-22cm-p-227.html>



Kleszczyki MIXTER zagięte, preparacyjne - (wybór długości: 18cm, 22cm)

Cena brutto **23,65 zł**

Cena netto **21,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki MIXTER, zagięte preparacyjne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszczyki MIXTER, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Opis produktu

Kleszczyki naczyniowe **MIXTER** to precyzyjne narzędzie stosowane w zabiegach chirurgicznych, szczególnie w pracy na naczyniach krwionośnych i głębokich strukturach anatomicznych. Charakteryzują się **zagiętymi końcówkami**, co umożliwia łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc oraz precyzyjne chwytanie tkanek lub narzędzi.

Wykonane ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji.

Cechy produktu

Cecha

Opis

Długość: 18.0cm, 22.0cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Końcówki: Zagięte

Rodzaj: Kleszczyki naczyniowe MIXTER

Sterylizacja: Autoklaw / metody chemiczne

Najważniejsze zalety

- **Wysokiej jakości stal chirurgiczna** – odporność na korozję i uszkodzenia
- **Precyzyjna konstrukcja** – doskonała kontrola w trakcie zabiegu
- **Zagięte końcówki** – ułatwiają pracę w trudno dostępnych obszarach
- **Wielokrotna sterylizacja** – pełna kompatybilność z autoklawem
- **Profesjonalny standard** – idealne do medycyny, weterynarii i gabinetów zabiegowych

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 18cm , 22cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl