

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-mosquito-dandy-120cm-wygiete-naczyniowe-p-228.html>



## Kleszczyki MOSQUITO-DANDY 12.0cm, wygięte naczyniowe

Cena brutto **12,85 zł**

Cena netto **11,90 zł**

### Opis produktu

## Kleszczyki MOSQUITO - DANDY 12.0cm, wygięte, naczyniowe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki MOSQUITO - DANDY 14.0cm, wygięte, naczyniowe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

### Opis produktu

Kleszczyki **MOSQUITO-DANDY 12 cm** to klasyczne, małe kleszczyki hemostatyczne przeznaczone do pracy w wąskim, trudno dostępnym polu zabiegowym. Dzięki smukłej budowie idealnie nadają się do zaciskania drobnych naczyń, preparowania tkanek oraz precyzyjnych czynności chirurgicznych.

Wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej medycznej**, zapewniają trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie.

### Najważniejsze cechy produktu

- Długość:** 12,0 cm
- Typ:** Delikatne, smukłe kleszczyki hemostatyczne (MOSQUITO)
- Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- Mechanizm:** Zapadka blokująca (ratchet)
- Chwył:** Ergonomiczny, antypoślizgowy
- Sterylizacja:** Autoklawowalne
- Zastosowanie:** Chirurgia, zabiegi precyzyjne, weterynaria

### Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
<b>Długość:</b>	12,0 cm
<b>Typ:</b>	Hemostatyczne - MOSQUITO
<b>Materiał:</b>	Stal nierdzewna medyczna

---

☐☐ **Mechanizm:** Zapadka (ratchet)

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklaw

☐☐ **Zastosowanie:** Chirurgia, zabiegi precyzyjne, weterynaria

---

## ☐☐ Zastosowanie

- ✓ Zaciskanie małych naczyń
- ✓ Preparowanie drobnych struktur
- ✓ Zabiegi chirurgiczne w małym polu
- ✓ Gabinety zabiegowe i weterynaryjne

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

---

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl