

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-naczyniowe-halsted-mosquito-bez-zabka-wybor-rozmiarow-12-5cm-14cm-18cm-21cm-p-229.html>



Kleszczyki naczyniowe HALSTED-MOSQUITO bez zębka - (wybór rozmiarów: 12,5cm, 14cm, 18cm, 21cm)

Cena brutto	13,93 zł
Cena netto	12,90 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszczyki naczyniowe HALSTED-MOSQUITO anatomiczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki HALSTEAD-MOSQUITO, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

☐☐ Opis produktu

Profesjonalne **kleszczyki naczyniowe HALSTED-MOSQUITO** to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi chirurgicznych. Używane są do **zaciskania, chwytania i utrzymywania drobnych naczyń krwionośnych** lub tkanek podczas zabiegów chirurgicznych.

Dzięki precyzyjnemu wykonaniu oraz **rowkowanym końcówkom** zapewniają pewny i delikatny chwyt. Wykonane ze **stali nierdzewnej chirurgicznej** - odpornej na korozję, środki dezynfekcyjne i sterylizację.

Idealne do zastosowania w chirurgii, stomatologii, medycynie ogólnej i weterynarii.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐ Cecha

☐☐ Opis

☐☐ **Długość całkowita:** 12,5cm, 14cm, 18cm, 21cm

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

☐☐ **Rodzaj:** Kleszczyki naczyniowe anatomiczne

☐☐ **Końcówki:** Rowkowane, proste lub zagięte

☐☐ **Sterylizacja:** Tak - autoklaw / środki chemiczne

☐☐ **Zastosowanie:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria, kosmetologia

☐☐ **Stan:** Nowy

☐☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ Cechy

☐☐ Opis

☐☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i sterylizację

☐☐ **Precyzyjny chwyt:** Rowkowane końcówki zapobiegają poślizgowi

☐☐ **Prosta budowa:** Idealna do precyzyjnych manipulacji

☸ **Sterylizowalne:** Nadają się do autoklawowania i dezynfekcji

☑ **Zastosowanie profesjonalne:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: proste , zagięte

Długość:: 12.5cm , 14cm , 18cm , 21cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

