


Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-nosowe-weil-blakesley-190cm-p-248.html>

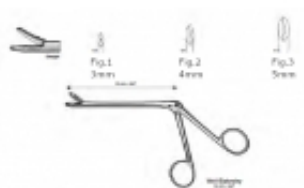

## Kleszczyki nosowe WEIL-BLAKESLEY 19.0cm

Cena brutto **106,92 zł**

Cena netto **99,00 zł**

### Opis produktu

## Kleszczyki nosowe WEIL-BLAKESLEY 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszczyki nosowe WEIL-BLAKESLEY 19.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj figury:** Fig.1 , Fig.2 , Fig.3

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

---

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)