

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-werthiem-zagiete-dlugosc-250cm-p-264.html>



## Kleszczyki WERTHIEM zagięte, długość 25.0cm

Cena brutto **29,05 zł**

Cena netto **26,90 zł**

### Opis produktu

## Kleszczyki WERTHIEM zagięte, długość 25.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki WERTHIEM 25.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Kleszczyki chirurgiczne typu Wertheim o długości 25 cm to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do chwytania i utrzymywania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Charakterystyczna końcówka zapewnia stabilny i precyzyjny chwyt, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia.

Odgięta konstrukcja umożliwi wygodną pracę w trudno dostępnych obszarach operacyjnych, szczególnie w głębokim polu zabiegowym. Narzędzie wykonane jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co gwarantuje trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji.

### Najważniejsze zalety

- Pewny chwyt dzięki końcówce
- Odgięta konstrukcja ułatwiająca pracę w głębokim polu operacyjnym
- Wydłużona forma (25 cm) zwiększająca zasięg i kontrolę
- Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- Możliwość wielokrotnej sterylizacji

### Specyfikacja techniczna

- Długość: 25,0 cm
- Typ: Wertheim
- Kształt: odgięte
- Materiał: stal nierdzewna
- Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

### Zastosowanie

- Zabiegi chirurgiczne wymagające pewnego chwytu tkanek
- Chirurgia ogólna i specjalistyczna
- Procedury w gabinetach medycznych i weterynaryjnych
- Manipulacja tkankami w głębokim polu operacyjnym

### Bezpieczeństwo i certyfikaty

- Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE
- Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami

- 
- ☐ Wymaga czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
- ⚠ Końcówki z zębami wymagają ostrożnego stosowania, aby uniknąć uszkodzenia tkanek
- ⚠ Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzia
- ⚠ Nie używać w przypadku uszkodzenia lub zużycia
- ⚠ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

#### ☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

#### ☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

#### ☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl