

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosciotrzymacz-kleszcze-do-trzymania-kosci-ustalacz-kostny-verbrugge-175cm-50mm-p-183.html>



## Kościotrzymacz, kleszcze do trzymania kości, ustalacz kostny VERBRUGGE 17.5cm, 5.0mm

Cena brutto	<b>128,52 zł</b>
Cena netto	<b>119,00 zł</b>

### Opis produktu

## Kościotrzymacz VERBRUGGE

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kościotrzymacz VERBRUGGE, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Kościotrzymacz Verbrugge jest wszechstronnym instrumentem, który idealnie nadaje się do wielu zabiegów wymagających manipulacji kości i tkanki kostnej. Poza tym szczęki mają umiarkowaną krzywiznę, dzięki czemu rękojeść pozostaje lekko uniesiona w stosunku do płaszczyzny szczęki i pozwala chirurgowi na optymalną dźwignię. Kleszcze Verbrugge mają konstrukcję pierścieniowego uchwytu, która pozwala na łatwą obsługę ręczną.

Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

### Dane kontaktowe

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

---

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl