

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosciotrzymacz-ustalacz-kostny-typu-backhaus-dlugosc-135cm-p-277.html>



## Kościotrzymacz, ustalacz kostny, (typu Backhaus), długość 13.5cm

Cena brutto **45,25 zł**

Cena netto **41,90 zł**

### Opis produktu

## Kościotrzymacz, ustalacz kostny 13.5cm (typu Backhaus)

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kościotrzymacz, ustalacz kostny 13.5cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Kościotrzymacz (ustalacz kostny) typu BACKHAUS o długości 13,5 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne wykorzystywane do stabilizacji tkanek, serwet operacyjnych oraz elementów w polu zabiegowym.

Ustalacz kostny 13.5cm jest zaciskiem ogólnego przeznaczenia, określanym również jako kleszcze repositionujące do stosowania w różnych procedurach wymagających zaciskania i manipulowania kością. Instrument ten może być używany, gdy doszło do złamania kości i są fragmenty, które należy usunąć, ale także w procedurach wymagających wyrównania segmentów kości i ponownego ustawienia. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Dzięki swojej konstrukcji umożliwia pewny chwyt oraz utrzymanie stabilności podczas procedur medycznych. Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji.

Precyzyjny mechanizm zamykający oraz ergonomiczny uchwyt wspierają bezpieczeństwo i komfort użytkownika.

### Najważniejsze zalety

- Stabilne utrzymanie tkanek i materiałów podczas zabiegów
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Kompaktowy rozmiar 13,5 cm zapewniający precyzję pracy
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Uniwersalne zastosowanie w procedurach chirurgicznych

### Specyfikacja techniczna

- Długość: 13,5 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: kościotrzymacz / ustalacz kostny BACKHAUS
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### Zastosowanie

---

Kośćciotrzymacz przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- □□ do stabilizacji pola operacyjnego
- □□ do mocowania serwet chirurgicznych
- □□ w chirurgii ogólnej i specjalistycznej
- □□ w szpitalach, klinikach i gabinetach zabiegowych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

---

## □□ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- □ Oznakowanie CE
- △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia mechanizmu
- △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia tkanek lub materiałów
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl

