

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/laryngoskop-mcintosh-z-4-lyzkami-w-etui-materialowym-p-659.html>



## Laryngoskop MCINTOSH z 4 łyżkami w etui materiałowym

Cena brutto **216,00 zł**

Cena netto **200,00 zł**

### Opis produktu

## Laryngoskop MCINTOSH z 4 łyżkami

Laryngoskop konwencjonalny (żarówkowy) MCINTOSH w zestawie z 4 łyżkami wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji.

Zestaw zawiera:

- chromowaną rękojeść o średnicy 28mm,
- 4 łyżki w rozmiarach 1,2,3,4,
- oświetlenie LED,
- etui materiałowe zapinane na rzepy.

Laryngoskop zasilany jest 2 bateriami LR14 ( podana cena nie zawiera baterii).  
Produkt posiada znak CE, objęty jest 2-letnią gwarancją.

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

---

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)