

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/laryngoskop-mcintosh-z-4-lyzkami-w-etui-materialowym-niebieskim-p-669.html>



## Laryngoskop MCINTOSH z 4 łyżkami w etui materiałowym niebieskim

Cena brutto **240,00 zł**

Cena netto **222,22 zł**

### Opis produktu

## Laryngoskop MCINTOSH z 4 łyżkami

Laryngoskop konwencjonalny MCINTOSH w zestawie z 4 łyżkami z oświetleniem LED wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji.

### Opis produktu

Laryngoskop MCINTOSH z oświetleniem LED to specjalistyczny zestaw medyczny przeznaczony do procedur związanych z intubacją oraz oceną dróg oddechowych. Komplet zawiera 4 łyżki w różnych rozmiarach, chromowaną rękojeść oraz praktyczne etui materiałowe.

#### Najważniejsze zalety:

- Profesjonalny zestaw do intubacji i diagnostyki
- Oświetlenie LED zapewniające dobrą widoczność pola pracy
- Chromowana rękojeść o średnicy 28 mm
- 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3 i 4
- Etui materiałowe ułatwiające transport i przechowywanie
- Elementy przystosowane do wielokrotnego użytkowania

### Opis produktu

Laryngoskop MCINTOSH to profesjonalny wyrób medyczny wykorzystywany podczas procedur intubacyjnych oraz oceny dróg oddechowych w warunkach szpitalnych, ratunkowych i zabiegowych.

Zestaw wyposażony został w chromowaną rękojeść o średnicy 28 mm zapewniającą wygodny chwyt i stabilność podczas użytkowania. Cztery łyżki w rozmiarach 1, 2, 3 i 4 umożliwiają dopasowanie instrumentu do różnych zastosowań klinicznych.

Wbudowane oświetlenie LED wspiera dobrą widoczność pola zabiegowego podczas procedur medycznych. Całość została umieszczona w praktycznym etui materiałowym ułatwiającym bezpieczne przechowywanie i transport zestawu.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego zastosowania medycznego przez wykwalifikowany personel.

### Specyfikacja techniczna

- Model: Laryngoskop MCINTOSH
- Rękojeść: chromowana
- Średnica rękojeści: 28 mm
- Typ oświetlenia: LED
- Ilość łyżek: 4 sztuki
- Rozmiary łyżek: 1, 2, 3, 4
- Produkt wielokrotnego użytku
- Etui materiałowe w zestawie

- 
- Laryngoskop zasilany jest 2 bateriami LR14 ( podana cena nie zawiera baterii).

---

## ▣▣ Zastosowanie

Laryngoskop MCINTOSH przeznaczony jest do profesjonalnych procedur związanych z intubacją, oceną dróg oddechowych oraz zastosowań anestezyjologicznych i ratunkowych.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- ▣▣ Szpitalach
- ▣▣ Zespołach ratownictwa medycznego
- ▣▣ Oddziałach anestezyjologicznych
- ▣▣\* Blokach operacyjnych
- ▣▣ Placówkach medycznych i zabiegowych

---

## ▣▣ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

### Ważne informacje:

- △ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- △ Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- △ Przed użyciem należy sprawdzić sprawność techniczną zestawu i oświetlenia
- △ Elementy wielokrotnego użytku wymagają odpowiedniej dezynfekcji i sterylizacji
- △ Nie używać uszkodzonych elementów zestawu

•

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

▣ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

▣ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.

---

C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl