

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/laryngoskop-mcintosh-z-4-lyzkami-w-etui-plastikowym-p-290.html>



Laryngoskop MCINTOSH z 4 łyżkami w etui plastikowym

Cena brutto **279,72 zł**

Cena netto **259,00 zł**

Opis produktu

Laryngoskop konwencjonalny (żarówkowy) MCINTOSH

Laryngoskop konwencjonalny (żarówkowy) MCINTOSH w zestawie z 4 łyżkami wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji.

Zestaw zawiera:

- chromowaną rękojeść o średnicy 28mm,
- 4 łyżki w rozmiarach 1,2,3,4,
- etui.

Laryngoskop zasilany jest 2 bateriami LR14 (podana cena nie zawiera baterii).
Produkt posiada znak CE, objęty jest 2-letnią gwarancją.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl