

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lopotka-stomatologiczna-do-cementu-gritmann-dlugosc-190cm-p-303.html>



Łopátka stomatologiczna do cementu GRITMANN, długość 19.0cm

Cena brutto **13,41 zł**

Cena netto **12,42 zł**

Opis produktu

Łopátka stomatologiczna do cementu GRITMANN 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łopatkę stomatologiczną do cementu GRITMANN 19.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Łopátka stomatologiczna do cementu GRITMANN o długości 19 cm to specjalistyczne narzędzie wykorzystywane w codziennej praktyce stomatologicznej. Służy do precyzyjnego mieszania oraz nakładania cementów i innych materiałów stomatologicznych.

Wykonana z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, charakteryzuje się trwałością oraz odpornością na działanie środków dezynfekcyjnych i procesów sterylizacji. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania i kontrolę podczas pracy, co jest istotne w precyzyjnych procedurach medycznych.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne mieszanie i aplikacja materiałów stomatologicznych
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Produkt wielokrotnego użytku – możliwość sterylizacji
- Długość 19 cm zapewniająca wygodę pracy
- Przeznaczona do profesjonalnych zastosowań stomatologicznych

Specyfikacja techniczna

- Długość: 19,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Typ narzędzia: łopátka stomatologiczna do cementu
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Łopátka przeznaczona jest do użytku w środowisku medycznym, w szczególności:

- do mieszania cementów stomatologicznych
- do przygotowywania materiałów w gabinetach dentystycznych
- podczas procedur stomatologicznych i protetycznych
- w klinikach, gabinetach stomatologicznych i pracowniach technicznych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- ⚠ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkownika
- ⚠ Przed użyciem należy przeprowadzić proces mycia, dezynfekcji i sterylizacji
- ⚠ Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń narzędzia
- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl