

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lopatka-szpatulka-do-jezyka-bruenings-190cm-p-297.html>



Łopátka, szpatułka do języka BRUENINGS 19.0cm

Cena brutto **21,49 zł**

Cena netto **19,90 zł**

Opis produktu

Łopátka, szpatułka do języka BRUENINGS 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łopátka, szpatułka do języka BRUENINGS, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Łopátka do języka typu BRUENINGS o długości 19 cm to specjalistyczne narzędzie medyczne stosowane do badania jamy ustnej oraz gardła. Umożliwia bezpieczne i wygodne przytrzymanie języka podczas diagnostyki i zabiegów.

Produkt wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji. Odpowiednio wyprofilowany kształt łopátki zwiększa komfort zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego, umożliwiając dokładną ocenę obszaru badania.

Najważniejsze zalety

- Ułatwia precyzyjne badanie jamy ustnej i gardła
- Wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej
- Produkt wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Długość 19 cm zapewniająca wygodę pracy
- Przeznaczona do profesjonalnych zastosowań medycznych

Specyfikacja techniczna

- Długość: 19,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Typ narzędzia: łopátka / szpatułka do języka BRUENINGS
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Łopátka przeznaczona jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- do badania jamy ustnej i gardła
- w diagnostyce laryngologicznej
- w gabinetach stomatologicznych
- w szpitalach, przychodniach i klinikach

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

Bezpieczeństwo i certyfikaty

-
- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - □ Oznakowanie CE
 - △ Wyrób medyczny - stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
 - △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
 - △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia powierzchni narzędzia
 - △ Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć urazów pacjenta
 - △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl