
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lopatka-szpatulka-do-jezyka-mayo-dlugosc-170cm-p-295.html>



Łopatką, szpatułka do języka MAYO, długość 17.0cm

Cena brutto **8,10 zł**

Cena netto **7,50 zł**

Opis produktu

☐☐ Łopatką, szpatułka do języka MAYO 17.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łopatką (szpatułka) do języka MAYO 17.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Narzędzie diagnostyczne dla gabinetów medycznych**

☐☐ Łopatką do języka **MAYO 17.0 cm** to wysokiej jakości narzędzie diagnostyczne używane w gabinetach lekarskich, laryngologicznych, stomatologicznych oraz podczas ogólnych badań jamy ustnej. Wykonana z trwałej, medycznej stali nierdzewnej, gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i możliwość wielokrotnego użytku.

☐ **Najważniejsze cechy produktu**

☐☐ **Model:** MAYO

☐☐ **Długość:** 17.0 cm

☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna odporna na korozję

☐☐ **Sterylizacja:** w pełni przystosowana do autoklawowania

☐☐ Gładkie, precyzyjnie wykończone krawędzie

☐☐ Ergonomiczny kształt zapewniający wygodny uchwyt

☐☐ Produkt wielorazowego użytku - trwały i niezawodny

☐☐ Zgodna z wymaganiami dla profesjonalnych wyrobów medycznych

☐☐ **Zastosowanie**

Idealna do:

- ✓ rutynowych badań jamy ustnej
- ✓ diagnostyki laryngologicznej

-
- ✓ zabiegów stomatologicznych
 - ✓ kontroli stanu języka, gardła i jamy ustnej
 - ✓ pracy w gabinetach lekarskich, klinikach i placówkach medycznych

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl