

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lusterka-lusterko-laryngologiczne-z-raczka-wybor-rozmiarow-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm-24mm-26mm-28mm-30mm-p-308.html>



Lusterka, lusterko laryngologiczne z rączką - (wybór rozmiarów: : 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm)

Cena brutto **11,34 zł**

Cena netto **10,50 zł**

Opis produktu

Lusterka, lusterko laryngologiczne z rączką

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe ostro/tępe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Podany wymiar lusterka jest mierzony po zewnętrznej stronie lusterka razem z metalową obwódką. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych lusterek, ponieważ metalowa obwódka ma ok.1mm, ponieważ dla lusterka o średnicy Ø12mm, pole "robocze" lusterka będzie miało średnicę ok. Ø10mm.

☐☐ Posiadamy w sprzedaży następujące średnice lusterek:

- Ø10mm,
- Ø12mm,
- Ø14mm,
- Ø16mm,
- Ø18mm,
- Ø20mm,
- Ø22mm,
- Ø24mm,
- Ø26mm,
- Ø28mm,
- Ø30mm.

☐☐Opis produktu

Profesjonalne **lusterko laryngologiczne z rączką** to niezbędne narzędzie diagnostyczne stosowane w **laryngologii, stomatologii oraz medycynie ogólnej**. Umożliwia dokładne **ogłędziny gardła, jamy ustnej, krtani oraz nosa**, zapewniając **czysty i precyzyjny obraz pola badania**.

Lusterko zostało wykonane z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne. Rączka o ergonomicznym kształcie gwarantuje **pewny chwyt i komfort pracy**, a zwierciadło pozwala na wygodne i precyzyjne manewrowanie w obszarze badania.

Produkt przeznaczony jest do **wielokrotnego użytku**, z możliwością **sterylizacji w autoklawie**.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐Cecha

☐☐Opis

-
- ☐ **Długość całkowita:** ok. 20.0 cm
 - ☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna
 - ☐ **Konstrukcja:** Lusterko z rączką, nierozłączne
 - ☸ **Sterylizacja:** Tak - autoklaw / środki chemiczne
 - ☐ **Zastosowanie:** Laryngologia, stomatologia, diagnostyka
 - ☐ **Stan:** Nowe

☐ **Najważniejsze cechy produktu**

☐ **Cechy**

☐ **Opis**

- ☐ **Wysokiej jakości stal chirurgiczna:** Trwałość, odporność na korozję i dezynfekcję
- ☐ **Średnica:** Idealna do badań laryngologicznych i stomatologicznych
- ☐ **Ergonomiczna rączka:** Pewny chwyt i wygoda użytkownika
- ☸ **Wielokrotnego użytku:** Przystosowane do autoklawowania
- ☐ **Czyste odbicie:** Precyzyjne odwzorowanie pola badania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica lusterka: Fig.0, Ø10mm , Fig.00, Ø8mm , Fig.1, Ø12mm , Fig.10, Ø30mm , Fig.2, Ø14mm , Fig.3, Ø16mm , Fig.4, Ø18mm , Fig.5, Ø20mm , Fig.6, Ø22mm , Fig.7, Ø24mm , Fig.8, Ø26mm , Fig.9, Ø28mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl