

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lusterko-stomatologiczne-plaskie-wybor-rozmiarow-20mm-22mm-24mm-26mm-p-309.html>



Lusterko stomatologiczne płaskie - (wybór rozmiarów: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm)

Cena brutto	4,86 zł
Cena netto	4,50 zł

Opis produktu

Lusterko stomatologiczne płaskie

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu lusterko stomatologiczne płaskie.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Podany wymiar lusterka jest mierzony po zewnętrznej stronie lusterka razem z metalową obwódką. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych lusterek, ponieważ metalowa obwódka ma ok.1mm, ponieważ dla lusterka o średnicy Ø12mm, pole "robocze" lusterka będzie miało średnicę ok. Ø10mm.

Posiadamy w sprzedaży następujące średnice lusterek stomatologicznych:

- Ø20mm,
- Ø22mm,
- Ø24mm,
- Ø26mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica lusterka:: Ø20mm , Ø22mm , Ø24mm , Ø26mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.

10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl