

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lyzeczka-jansen-dlugosc-150cm-p-315.html>



Łyżeczka JANSEN, długość 15.0cm

Cena brutto **21,49 zł**

Cena netto **19,90 zł**

Opis produktu

Łyżeczka JANSEN 15.0cm / 6"

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łyżeczkę JANSEN 15.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Łyżeczki kostne, również znane pod nazwą łyżki kostne, to narzędzia chirurgiczne, które dzięki swojej główce narzędziowej w kształcie łyżki o ostrych krawędziach służą w medycynie do usuwania martwej tkanki i oczyszczania jamy rany. Łyżeczki kostne wyjątkowo często stosuje się w stomatologii jako łyżeczki zębodołowe lub w dermatologii jako łyżeczki dermatologiczne.

W dermatologii łyżeczki kostne stosuje się przede wszystkim do chirurgicznego usuwania brodawek. Łyżeczki dermatologiczne służą również do pobierania próbek tkanki.

Łyżeczki chirurgiczne dostępne są w szerokim wyborze rozmiarów i kształtów, np. jako łyżeczki z wydrążonym trzonkiem lub z płaskimi końcówkami. Ponadto końcówki mogą być wygięte, zakrzywione lub proste, tak aby móc dopasować odpowiedni instrument do każdego przeznaczenia.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl