
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lyzeczka-kostna-bruns-wybor-rozmiarow-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8-5mm-10mm-12mm-13-5m-15mm-p-316.html>



Łyżeczka kostna BRUNS - (wybór rozmiarów: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8,5mm, 10mm, 12mm, 13,5m, 15mm)

Cena brutto	24,73 zł
-------------	-----------------

Cena netto	22,90 zł
------------	-----------------

Opis produktu

ŁYŻECZKA KOSTNA BRUNS

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łyżeczkę kostną BRUNS, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Opis produktu

Łyżeczka kostna **Bruns** to profesjonalne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego usuwania, wygładzania i opracowywania tkanki kostnej w trakcie zabiegów medycznych. Model **Bruns** posiada miseczkowatą końcówkę, która zapewnia pełną kontrolę i dokładność pracy.

Łyżeczki kostne, również znane pod nazwą łyżki kostne, to narzędzia chirurgiczne, które dzięki swojej główce narzędziowej w kształcie łyżki o ostrych krawędziach służą w medycynie do usuwania martwej tkanki i oczyszczania jamy rany. Łyżeczki kostne wyjątkowo często stosuje się w stomatologii jako łyżeczki zębodołowe lub w dermatologii jako łyżeczki dermatologiczne.

W dermatologii łyżeczki kostne stosuje się przede wszystkim do chirurgicznego usuwania brodawek. Łyżeczki dermatologiczne służą również do pobierania próbek tkanki.

Łyżeczki chirurgiczne dostępne są w szerokim wyborze rozmiarów i kształtów, np. jako łyżeczki z wydrążonym trzonkiem lub z płaskimi końcówkami. Ponadto końcówki mogą być wygięte, zakrzywione lub proste, tak aby móc dopasować odpowiedni instrument do każdego przeznaczenia.

Wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**, jest odporna na uszkodzenia, korozję oraz wielokrotne procesy sterylizacji.

Najważniejsze cechy produktu

Materiał: Stal nierdzewna medyczna

Sterylizacja: Autoklawowalna

Wytrzymałość: Wysoka odporność na korozję

Ergonomia: Wygodny, antypoślizgowy uchwyt

Zastosowanie: Chirurgia / Ortopedia / Weterynaria

Specyfikacja techniczna

Cecha Wartość

Material: Stal nierdzewna medyczna

Sterylizacja: Autoklaw

Waga: Lekka, precyzyjna

Zastosowanie: Chirurgia, ortopedia, weterynaria

Zastosowanie

- ✓ Usuwanie fragmentów kostnych
- ✓ Opracowywanie jam i powierzchni kostnych
- ✓ Zabiegi ortopedyczne
- ✓ Weterynaria i pracownie zabiegowe

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne rozmiary łyżeczki BRUNS w sprzedaży:

- **Fig. 0000 => Ø3mm,**
- **Fig.000 => Ø4mm,**
- **Fig.00 => Ø5mm,**
- **Fig.0 => Ø6mm,**
- **Fig.1 => Ø7mm,**
- **Fig.2 => Ø8,5mm**
- **Fig.3 => Ø10mm,**
- **Fig.4 => Ø12mm**
- **Fig.5 => Ø13,5mm**
- **Fig.6=> Ø15mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj i wielkość łyżeczki: Fig. 0, Ø6mm , Fig. 00, Ø5mm , Fig. 000, Ø4mm , Fig. 0000, Ø3mm , Fig. 1, Ø7mm , Fig. 2, Ø8.5mm , Fig. 3, Ø10mm , Fig. 4, Ø12mm , Fig. 5, Ø13.5mm , Fig. 6, Ø15mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.

-
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
 4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
 5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
 6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl