

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/mikrokleszczyki-uszne-80mm-wybor-figur-p-328.html>



Mikrokleszczyki uszne 80mm - wybór figur

Cena brutto **77,65 zł**

Cena netto **71,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Mikrokleszczyki uszne 80mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu mikrokleszczyki uszne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

W sprzedaży posiadamy następujące figury mikrokleszczyków usznych:

- **Fig.1, proste, gładkie, (na zdjęciu)**
- **Fig.2, proste, ryflowane,**
- **Fig.3, zagięte do góry,**
- **Fig.4, zagięte w prawo,**
- **Fig.5, zagięte w lewo.**

☐☐ Opis produktu

Mikrokleszczyki uszne **80 mm**, to instrument przeznaczony do precyzyjnych zabiegów w obrębie przewodu słuchowego i struktur ucha. Ryflowane końcówki zapewniają pewny chwyt delikatnych tkanek i materiałów, gwarantując najwyższą stabilność podczas pracy.

Wykonane ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, opracowane z myślą o precyzji i trwałości, idealne do użycia w laryngologii, otologii oraz mikrozabiegach.

☐ Cechy produktu

☐☐ Cecha ☐☐ Wartość

☐☐ **Długość:** 80 mm (8 cm)

☐☐ **Ułożenie:** Proste

☐☐ **Kończówki:** Ryflowane

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklaw / chemiczna

☐☐ Zalety produktu

- ☐☐ **Miniaturowa długość 8 cm** - idealna do mikrozabiegów

-
- **Ryflowane końcówki** zapewniające stabilny chwyt
 - **Prosta konstrukcja** dla pełnej kontroli pracy
 - **Stal chirurgiczna najwyższej klasy** – odporna na korozję i uszkodzenia
 - **Wielokrotna sterylizacja** w autoklawie

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[Kleszczyki PEAN, KOCHER, BABY-MIXTER, CRILE, DANDY, GEMINI, HARTMANN, HEISS, KELLY, LERICHE, MOSQUITO-DANDY, HALSTEAD-MOSQUITO, MICRO-MOSQUITO, OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury: prosta, gładka , prosta, wzorek , zagięta do góry , zagięta w lewo , zagięta w prawo

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl