

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/noz-do-adenotomii-beckmann-220cm-odgiety-wybor-rozmiarow-p-357.html>

Nóż do adenotomii BECKMANN 22.0cm odgięty - wybór rozmiarów



Cena brutto **29,05 zł**

Cena netto **26,90 zł**

Opis produktu

Nóż do adenotomii BECKMANN 22.0cm zagięty

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nóż do adenotomii BECKMANN 22.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

W sprzedaży posiadamy następujące wielkości noży do adenotomii BECKMANN:

- Fig.1, szerokość noża 14mm, szerokość otworu 10mm,
- Fig.2, szerokość noża 17mm, szerokość otworu 12mm,
- Fig.3, szerokość noża 18mm, szerokość otworu 14mm,
- Fig.4, szerokość noża 19mm, szerokość otworu 15mm,
- Fig.5, szerokość noża 22mm, szerokość otworu 16mm,
- Fig.6, szerokość noża 24mm, szerokość otworu 17mm.

tolerancja wymiaru +-1mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Fig.1, 10mm , Fig.2, 12mm , Fig.3, 14mm , Fig.4, 16mm , Fig.5, 18mm , Fig.6, 20mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.

10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl