

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-chirurgiczne-14cm-ostroostre-z-twarda-wkladka-utwardzana-weglikiem-wolframu-tc-p-400.html>



Nożyczki chirurgiczne 14cm ostro/ostre z twardą wkładką utwardzaną węglikiem wolframu, TC

Cena brutto	79,92 zł
Cena netto	74,00 zł

Opis produktu

∞ Nożyczki chirurgiczne 14cm z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu, TC

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki MAYO, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, mogą być poddawany procesowi sterylizacji.

Opis produktu

Nożyczki operacyjne standard 14 cm ostro/ostre proste z wkładką TC (tungsten carbide) to wysokiej klasy instrument chirurgiczny przeznaczony do precyzyjnego cięcia tkanek oraz materiałów zabiegowych. Wzmocnione krawędzie tnące z wkładką TC zapewniają wyjątkową trwałość, ostrość i długą żywotność narzędzia.

Najważniejsze cechy produktu

- **Długość:** 14 cm
- ∞ **Ostro/Ostre** - dwie ostre końcówki dla precyzyjnego cięcia
- → **Prosta konstrukcja** - wygodna do standardowych zabiegów chirurgicznych
- **Twarda wkładka TC (tungsten carbide)** - zwiększona wytrzymałość i dłuższa ostrość
- **Stal nierdzewna klasy medycznej** - odporność na korozję
- **Możliwość sterylizacji** we wszystkich standardowych metodach
- **Przeznaczenie:** chirurgia ogólna, zabiegowa, ambulatoryjna

Zastosowanie

Nożyczki idealnie sprawdzą się podczas:

- ∞ cięcia tkanek
- cięcia szwów
- przygotowywania materiałów opatrunkowych
- zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych

Atesty i zgodność

-
- ✓ Produkt jest **wyrobem medycznym**
 - ✓ Spełnia normy dla instrumentów chirurgicznych
 - ✓ Odpowiedni do użytku klinicznego i profesjonalnego

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

