

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-chirurgiczne-operacyjne-standardowe-ostrotepe-wybor-rozmiarow-11-5cm-14cm-16cm-18cm-20cm-p-402.html>



Nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe ostro/tępe - (wybór rozmiarów: 11,5cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm)

Cena brutto **9,83 zł**

Cena netto **9,10 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe ostro/tępe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe ostro/tępe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Opis produktu

Oferowane **nożyczki chirurgiczne (operacyjne)** to instrument medyczny wykonany ze stali nierdzewnej. Końcówki **ostro/tępe** oraz **prosta** lub **zagięta** konstrukcja zapewniają precyzję i kontrolę podczas pracy wykonywanej przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja techniczna

- **Długość:** 11,5cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm
- **✂ Typ:** nożyczki chirurgiczne / operacyjne
- **Końcówki:** ostro/tępe
- **Kształt:** proste lub zagięte
- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Rodzaj produktu:** wyrób medyczny – instrument chirurgiczny

Czyszczenie i sterylizacja

- odporne na sterylizację parową
- możliwość sterylizacji chemicznej
- gładka powierzchnia ułatwia dezynfekcję

Zastosowanie

(Wyłącznie dla osób wykwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi procedurami)

- □□ zabiegi chirurgiczne i ambulatoryjne
- □□ procedury medyczne wymagające precyzyjnego cięcia
- □□ zastosowania pomocnicze w instrumentarium zabiegowym

Na naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: proste , zagięte

Długość:: 11.5cm , 14cm , 16cm , 18.5cm , 20cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

