

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-chirurgiczne-operacyjne-standardowe-tępo-tępe-wybor-rozmiarow-11-5cm-14cm-16cm-18cm-20cm-p-403.html>



Nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe tępo/tępe - (wybór rozmiarów: 11,5cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm)

Cena brutto **9,83 zł**

Cena netto **9,10 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe tępo/tępe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki chirurgiczne (operacyjne) standardowe tępo/tępe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Opis produktu

Profesjonalne **nożyczki chirurgiczne tępo/tępe proste** wykonane są z wysokiej jakości **stali nierdzewnej chirurgicznej**. To uniwersalne narzędzie stosowane w zabiegach chirurgicznych, ambulatoryjnych, kosmetycznych i weterynaryjnych. Model z **tępymi końcówkami** zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy, minimalizując ryzyko przypadkowego uszkodzenia tkanek.

Specyfikacja produktu:

- **Rodzaj:** nożyczki chirurgiczne / operacyjne
- **Model:** tępo/tępe, proste lub zagięte
- **Długość całkowita:** 11,5cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm
- **Materiał:** stal nierdzewna chirurgiczna
- **Powierzchnia:** matowa (antyrefleksyjna)
- **Krawędzie tnące:** precyzyjnie ostrzone
- **Możliwość sterylizacji:** tak (autoklaw, środki chemiczne)
- **Wielokrotnego użytku:** tak

☐ **Zastosowanie:**

- zabiegi chirurgiczne i ambulatoryjne
- kliniki medyczne, weterynaryjne, kosmetyczne
- prace laboratoryjne i edukacyjne
- wyposażenie zestawów pierwszej pomocy

☐ **Zalety produktu:**

- ✓ wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej
- ✓ precyzyjne ostrza - czyste i kontrolowane cięcie
- ✓ bezpieczne tępe końcówki chroniące tkanki
- ✓ ergonomiczny kształt dla wygody użytkowania
- ✓ możliwość wielokrotnej sterylizacji i dezynfekcji

Na naszych pozostałych aukcjach Allegro mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Długość: 11.5cm , 14cm , 16cm , 18.5cm , 20cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,

Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl