
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-kelly-ostro/ostre-proste-wybor-rozmiarow-16cm-18cm-p-380.html>



Nożyczki Kelly ostro/ostre, proste - (wybór rozmiarów: 16cm, 18cm)

Cena brutto	16,09 zł
Cena netto	14,90 zł

Opis produktu

✂ Nożyczki Kelly ostro/ostre

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki Kelly, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Precyzyjne nożyczki chirurgiczne **Kelly** o wymiarach 14.0cm i 16cm wyprodukowane ze stali chirurgicznej. Nożyczki Kelly są wykorzystywane podczas zabiegów chirurgicznych. Mogą być przydatne przy preparowaniu tkanek, także do przecinania materiału szewnego i drobnych cięć w warunkach domowych. Nożyczki Kelly są wyposażone w ostre końcówki w części roboczej.

Zalety nożyczek Kelly ze stali chirurgicznej

- lekkie i wygodne w użyciu
- ostre powierzchnie tnące
- precyzyjnie i szybko tną nici chirurgiczne oraz materiały opatrunkowe
- wysoka jakość wykonania i uniwersalne zastosowanie

☐ Nożyczk**Kelly** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne stosowane w wielu specjalizacjach medycznych. Wersja **ostro/ostre, proste** zapewnia dokładne i pewne cięcie tkanek miękkich oraz materiałów zabiegowych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gwarantują trwałość, ostrość oraz odporność na korozję.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐ **Długość:** 16cm, 18cm

✂ **Kończówki:** ostre/ostre

☐ **Kształt:** proste

☐ **Materiał:** stal nierdzewna medyczna

☐ **Sterylizacja:** możliwa w autoklawie

☐ Trwałe ostrza o wysokiej precyzji

☐ Stabilny i komfortowy chwyt

☐ Narzędzie profesjonalne, idealne do codziennej pracy w placówkach medycznych

☐☐ Zastosowanie

Nożyczki Kelly sprawdzą się m.in. w:

- ✓ chirurgii ogólnej
- ✓ zabiegach ambulatoryjnych
- ✓ procedurach pielęgniarstkich
- ✓ cięciu tkanek miękkich i materiałów opatrunkowych

Precyzyjne nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej

- typ Kelly,
- dostępne długość: 16cm, 18cm
- materiał: stal chirurgiczna
- rodzaj końcówek: ostro/ostre

Narzędzia chirurgiczne powinny być wysterylizowane lub zdezynfekowane przed pierwszym użyciem.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 16cm , 18cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl