

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-mayo-noble-170cm-p-384.html>



Nożyczki MAYO-NOBLE 17.0cm

Cena brutto	18,25 zł
Cena netto	16,90 zł

Opis produktu

Nożyczki MAYO-NOBLE 17.0cm, proste

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki MAYO-NOBLE 17.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Nożyczki chirurgiczne MAYO-NOBLE 17 cm z matowej stali chirurgicznej są solidne i mocne, posiadają wzmocniony przekrój. **Nożyczki preparacyjne** z częścią chwytą oraz łopatkami tnącymi. Nożyczki MAYO-NOBLE są służą do preparowania tkanek twardszych w trakcie zabiegu.. Nożyczki chirurgiczne zastosowanie w laboratoriach, szpitalach i klinikach medycznych.

Narzędzia chirurgiczne są wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Nożyczki chirurgiczne MAYO-NOBLE

- model MAYO-NOBLE
- długość 17cm
- ze stali nierdzewnej

Zalety korzystania z nożyczek typu MAYO-NOBLE

- solidne, trwałe i mocne
- uniwersalne zastosowanie
- wykonane ze stali chirurgicznej
- wygodne w użyciu

Dodatkowe informacje

Nożyczki MAYO-NOBLE są wysyłane w oddzielnych opakowaniach. Nożyczki są fabrycznie nowe. Nożyczki chirurgiczne MAYO-NOBLE posiadają rozmiar 17cm. Przed pierwszym użyciem nożyczek chirurgicznych zalecamy przeprowadzenie sterylizacji lub dezynfekcji. Nożyczki MAYO-NOBLE powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem medycznym tj. do preparowania tkanek, przecinania nici chirurgicznych i opatrunków.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Na naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-NOBLE-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl